

FR Mode d'emploi



Cher client! Chère cliente!


Merci d'avoir choisi **Dr. Vac**. Maintenant, pour toute la famille, le nettoyage des oreilles n'est plus un danger, il s'effectue en douceur et en toute sécurité.

Contenu de la livraison

- 1 appareil Dr. Vac
- 8 embouts en silicone (2 jaunes, 2 verts, 2 rouges, 2 bleus)
- 1 brosse de nettoyage
- 1 mode d'emploi

Éléments

- 1 - Embout en silicone
- 2 - Buse
- 3 - Dispositif de sécurité
- 4 - Réceptacle
- 5 - Filtre
- 6 - Interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE
- 7 - Compartiment des piles
- 8 - Lumière

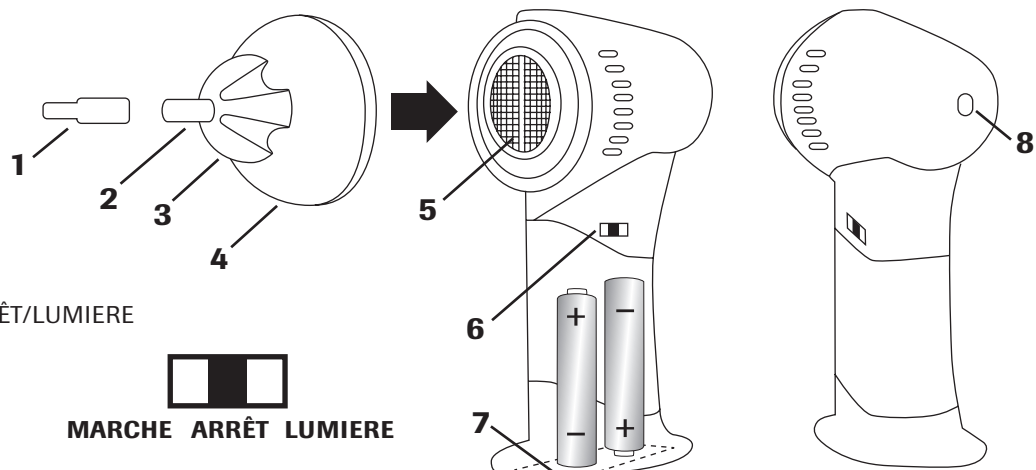

Utilisation

1. Enlevez l'emballage et évacuez-le conformément aux prescriptions légales en vigueur.
2. Ouvrez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle de la batterie.
3. Faites attention à la polarité (+/-). Placez 2 piles AA de 1,5 V neuves; le cas échéant, enlevez tout d'abord les batteries usagées.
4. Refermez le compartiment des piles en insérant le couvercle et en le faisant glisser à nouveau.

CONSIGNES: fonctionne avec 2 piles AA de 1,5 V – non fournies. Lorsque la puissance de l'appareil diminue, remplacez toujours les deux piles.

5. Positionnez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur "LUMIERE". La lumière vous permet de regarder à l'intérieur de l'oreille avant d'utiliser l'appareil, pour voir où se trouvent les dépôts.
6. Placez l'embout en silicone sur la buse du nettoyeur d'oreilles.
7. Positionnez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur "MARCHÉ" et insérez avec précaution la buse dans l'oreille à nettoyer.
8. Faites avec l'appareil de légers petits mouvements circulaires d'avant en arrière, pour atteindre tous les dépôts.
9. Après utilisation, retirez la buse de l'oreille et positionnez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur "ARRÊT".
10. Nettoyez minutieusement l'embout et le réceptacle. Il faut faire de même pendant le nettoyage si l'embout utilisé est bouché.

ASTUCE: il est conseillé d'utiliser l'appareil après le bain ou la douche, car les dépôts s'éliminent alors plus facilement. Pour des raisons d'hygiène, un embout devrait être utilisé par une seule personne, et il devrait également être changé à intervalles réguliers!

Nettoyage et conservation

ATTENTION: n'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage de l'appareil et de ses accessoires!

1. Eteignez l'appareil - interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE en position "ARRÊT".
2. Enlevez l'embout en silicone de la buse et nettoyez les embouts utilisés avec de l'eau chaude, éventuellement avec un peu de savon.
3. Enlevez le réceptacle de l'appareil en le dévissant et nettoyez-le avec de l'eau chaude, éventuellement avec un peu de savon.
4. Retirez le filtre et nettoyez-le avec la brosse de nettoyage. Si nécessaire, vous pouvez également laver le filtre à l'eau chaude, éventuellement avec un peu de savon.
5. Vous pouvez nettoyer le boîtier avec un linge humide et l'essuyer ensuite avec un chiffon sec.
6. L'appareil et ses accessoires doivent être complètement secs avant d'être réassemblés.
7. Les conserver dans un lieu propre et sec, hors de portée des enfants et des animaux.

Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les vices résultant d'une utilisation inappropriée, de détériorations ou de tentatives de réparation. Ceci est valable également pour l'usure normale.

Sécurité

Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil! Respectez toutes les consignes de sécurité, pour éviter les dommages dus à un usage inapproprié! Conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Si vous devez transmettre l'appareil à des tiers, remettez-leur également ce mode d'emploi.

ATTENTION:

- Cet appareil est destiné à un usage privé.
- Cet appareil est destiné au nettoyage des oreilles. Ne pas l'utiliser à d'autres fins non adaptées.
- Risque d'étouffement par ingestion. Tenir les matériaux d'emballage, ainsi que l'appareil lui-même, les embouts en silicone et les piles hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants et de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes – y compris les enfants – : celles dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées et celles qui manquent de l'expérience et des connaissances nécessaires. Ceci ne s'applique pas à ces dernières, si elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil ou si elles l'utilisent sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance, afin qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Dans le cas d'un trouble de santé des oreilles, des conduits auditifs ou du tympan, il faut absolument consulter un médecin préalablement à toute utilisation de cet appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des embouts en silicone.
- Ne pas enfoncer la buse trop profondément dans l'oreille, pour éviter les blessures du conduit auditif ou du tympan.
- Eteignez l'appareil dès que vous ressentez des douleurs en cours d'utilisation, et consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. S'il s'avère être défectueux, ne l'ouvrez sous aucun prétexte. Il n'y a aucune garantie pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte. Contactez le service clients.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les pièces fournies.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou mouillées, et assurez-vous que l'appareil ne risque pas de tomber dans l'eau ou autres liquides.
- Ne pas couvrir la fente de ventilation lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, afin d'éviter une surchauffe de ce dernier.
- Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à ne pas laisser pénétrer de liquides.
- Ne pas faire tomber l'appareil et ne pas l'exposer à de gros chocs.
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures, à des variations de température, à un ensoleillement direct ou à l'humidité.

Utiliser les piles en toute sécurité:

- Vérifiez les contacts de l'appareil et la propreté des piles, avant de les installer, les nettoyer le cas échéant.
- N'utiliser que les piles indiquées dans les données techniques.
- Si les piles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, enlevez les piles de l'appareil. Vous éviterez ainsi les dommages qui pourraient résulter des fuites ; évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de batterie. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée à l'eau claire, et contactez immédiatement un médecin.

- L'ingestion de piles peut mettre la vie en danger. Si cela se produit, contactez immédiatement un médecin.
- Retirez immédiatement les piles qui coulent de l'appareil. Nettoyez les contacts avant de remettre de nouvelles piles.

Données techniques et élimination:

Alimentation : 3 V DC (2 piles AA de 1,5 V)

Ce produit a été fabriqué à partir de pièces et de matériaux de première qualité, qui peuvent être réutilisés et recyclés.



En fin de vie du produit, ne l'éliminez pas avec les ordures ménagères courantes. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par ce symbole sur le produit, sur le mode d'emploi et sur l'emballage. Renseignez-vous sur les points de collecte gérés par votre vendeur ou les autorités locales. La réutilisation et le recyclage des appareils usagés contribuent de manière essentielle à la protection de notre environnement.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles.

Importateur CH:

MediaShop AG | Schliessa 3 | 9495 Triesen | Liechtenstein
+423 38 81 800 | info@mediashop.li

Importateur EU:

MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a
2620 Neunkirchen | Austria | +43 2635 90160
office@mediashopholding.com

www.mediashop.tv