

Trusty Cane

The cane you can trust

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Consultez un médecin avant utilisation.

Contre-indications

Déconseillé aux personnes de plus de 113 kg.


Déconseillé sur surfaces gelées ou glissantes.

Déconseillé aux personnes allergiques au latex.

MODE D'EMPLOI

Pour déplier votre Trusty Cane™

Tenez simplement la poignée et laissez les segments pliables se déplier vers le sol. Pour éviter les chutes, vérifiez toujours que les segments individuels (**Fig. 1**) sont bien verrouillés.

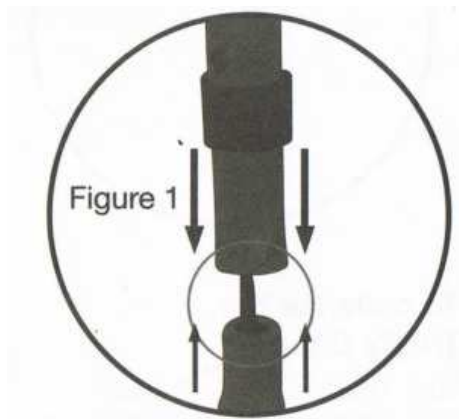

⚠ AVERTISSEMENT


NE PAS démonter le corps de la Trusty Cane™. La canne contient un cordon élastique intérieur. Une libération incontrôlée de ce cordon élastique peut causer des blessures graves à des parties du corps non protégées, en particulier les yeux. Si le cordon élastique est sectionné, effiloché ou endommagé, cessez d'utiliser la canne. NE PAS tendre le cordon plus que nécessaire pour démonter et remonter les segments.

Pour régler la hauteur de votre Trusty Cane™

Desserrez le verrou rotatif (**Fig. 2**) en tournant plusieurs tours dans le sens horaire. Appuyez sur le bouton de verrouillage (**Fig. 3**) et tirez sur la poignée pour allonger, ou poussez sur la poignée pour raccourcir. N'oubliez pas de resserrer le verrou rotatif après avoir réglé la Trusty Cane™ à la hauteur désirée.


AVERTISSEMENT

Pour éviter les chutes, assurez-vous toujours que les segments individuels sont bien verrouillés et que le bouton de verrouillage est complètement enfoncé.

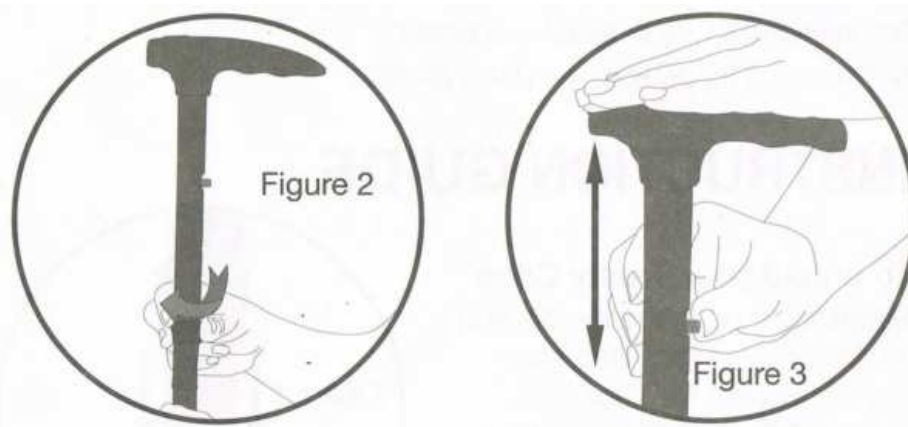


Pour raccourcir la Trusty Cane™

Votre Trusty Cane™ se plie facilement pour occuper une taille pratique pour les voyages, en désolidarisant les 4 segments. Tenez chaque paire de segments près de la jointure et séparez-les (**Fig. 4**). Les segments individuels se plieront soigneusement ensemble (**Fig. 5**).

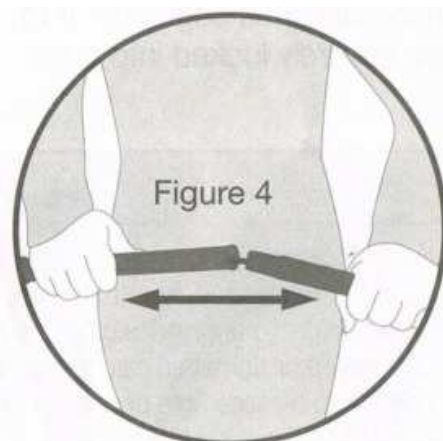

Pour utiliser les lumières de votre Trusty Cane™

Le bouton placé sur le dessus de la poignée de la Trusty Cane™ (**Fig. 6**) active les lumières. Appuyez sur le bouton une fois pour activer les lumières, et une seconde fois pour les éteindre. Les lumières s'éteignent automatiquement après 20 minutes.

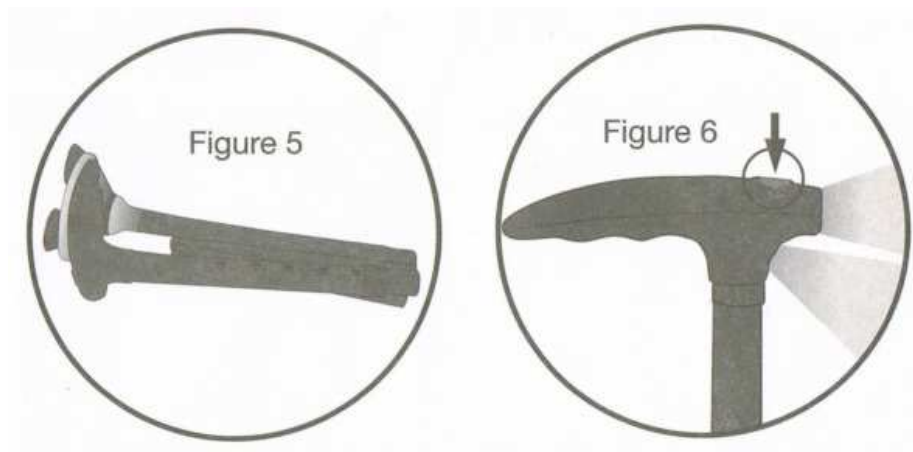

Entretien de votre Trusty Cane™

Pour remplacer les piles, utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser le compartiment de la batterie sous la poignée de la Trusty Cane™.

Retirez les piles usagées et jetez-les à l'endroit prévu à cet effet. Fonctionne avec 3 piles AAA : alignez les signes + et - comme indiqué, sinon les lumières ne s'allumeront pas. Remplacez et serrez la vis sur le clapet du compartiment.

Inspectez régulièrement la canne à la recherche de signes d'usure, y compris un effilochage du cordon élastique ou une usure éventuelle du pied en caoutchouc. Si vous constatez des signes d'usure, cessez immédiatement d'utiliser la canne.

AVERTISSEMENT

- NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves
- NE PAS mélanger piles alcalines, piles standards (carbone zinc) et piles rechargeables (nickel cadmium).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité limitée au prix d'achat de ce produit.

Telebrands Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects ou de toute garantie implicite sur ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; par conséquent, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

TELEBrands.

Fairfield, NJ 07004

www.Telebrands.com

Made in China.

©2013 Telebrands Corp

TBTCIMR13091813