

Trusty Cane

The cane you can trust

Lees de instructies voor gebruik.

Raadpleeg een dokter voor gebruik.

Contra-indicaties

Niet geschikt voor personen van meer dan 113 kg.


Niet geschikt bij ijzige of gladde omstandigheden.

Niet geschikt voor personen met een latexallergie.

INSTRUCTIES

Om uw Trusty Cane™ te ontvouwen

Hou de greep vast en laat de plooibare segmenten ontvouwen in de richting van de vloer. Om vallen te voorkomen moet u altijd nagaan of alle segmenten (**fig. 1**) goed in elkaar geschoven zijn.

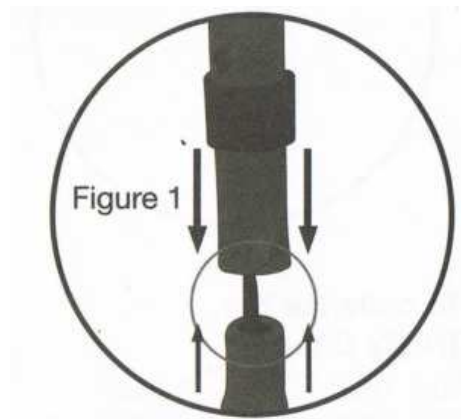

⚠ WAARSCHUWING


Demonteer de Trusty Cane™ NIET. De stok heeft binnenin een rekker. Wanneer de rekker onverwachts scheurt dan kan deze onbeschermd lichaamsonderdelen, voornamelijk de ogen, zwaar verwonden. Wanneer de rekker gescheurd, rafelig of beschadigd is, gebruik dan de Trusty Cane™ niet meer. Rek de rekker NIET meer uit dan nodig is om de segmenten op te vouwen of te ontvouwen.

Om de hoogte van uw Trusty Cane™ aan te passen

Doe de draaiknop (**fig. 2**) los door verschillende keren met de klok mee te draaien. Druk op de sluitingsknop (**fig. 3**) en trek aan de greep om langer te maken of duw de hendel naar beneden om korter te maken. Vergeet niet om de draaiknop weer aan te draaien nadat de Trusty Cane™ aan de gewenste hoogte aangepast is.


WAARSCHUWING

Om vallen te voorkomen moet u altijd nagaan of alle segmenten goed in elkaar geschoven zijn en of de sluitingsknop volledig ingedrukt is.

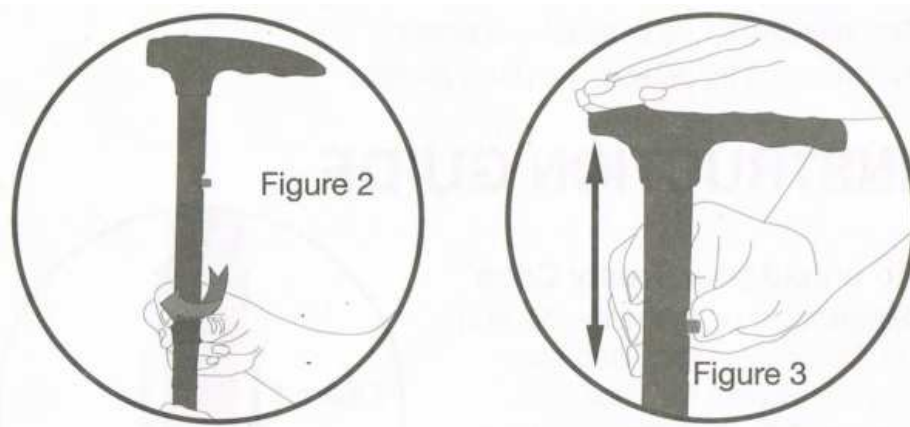


Om uw Trusty Cane™ op te vouwen

Uw Trusty Cane™ kan makkelijk opgevouwen worden tot een handig reisformaat door de 4 aparte segmenten uit elkaar te trekken. Hou beide segmenten vast net voor het gewricht en trek uit elkaar (**fig. 4**). De verschillende segmenten zullen mooi samenvouwen (**fig. 5**).

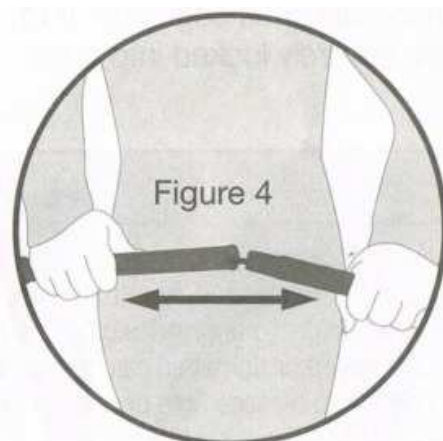

Om de lichtjes van uw Trusty Cane™ te gebruiken

De knop bovenaan de Trusty Cane™-greep (**fig. 6**) schakelt de lichtjes in. De knop eenmaal indrukken schakelt de lichtjes in, de knop nogmaals indrukken schakelt ze weer uit. De lichtjes schakelen automatisch uit na 20 minuten.

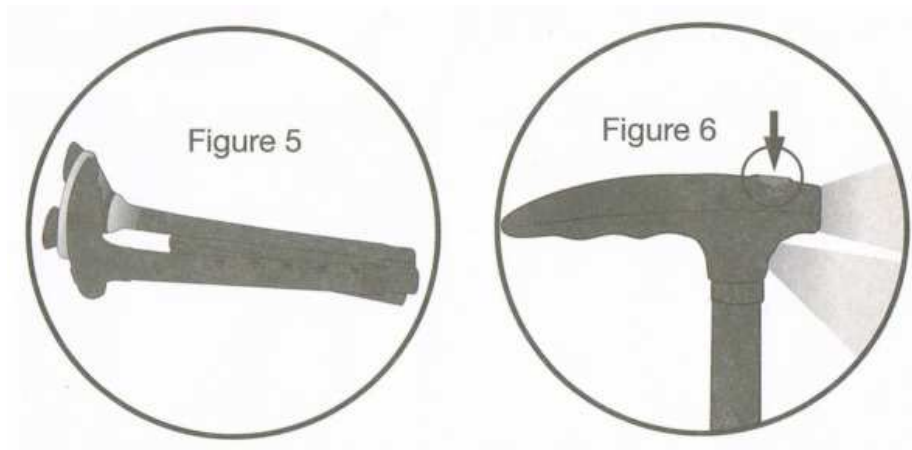

Uw Trusty Cane™ onderhouden

Gebruik een kruisschroevendraaier om de batterijhouder onder de Trusty Cane™-greep los te schroeven en de batterijen te vervangen.

Verwijder de lege batterijen en gooi op de juiste manier weg. Gebruik 3 AAA-batterijen, plaats + en - zoals aangegeven, anders zullen de lichtjes niet werken. Plaats de schroef op het deksel van de batterijhouder en draai hem aan.

Ga de stok regelmatig na op slijtage, inclusief het eventueel uitrafelen van de rekker of slijtage aan de rubber voetjes. Stop het gebruik onmiddellijk bij slijtage.

WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik GEEN alkaline, gewone (zink-koolstof) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van dit product.

TeleBrands Corporation is niet aansprakelijk voor bijkomende schade of gevolgschade of enige impliciete garantie op dit product.

TELEBrands.

Fairfield, NJ 07004
www.Telebrands.com
Made in China.
©2013 Telebrands Corp
TBTCIMR13091813